

地塞米松胶体金快速检测卡使用说明书

产品编号：YB145R01K

概要

地塞米松 (Dexamethasone) , 又名氟美松、氟甲强地松龙、德沙美松，是糖皮质激素类药物，其衍生物有氢化可的松、泼尼松等，药理作用主要是抗炎、抗毒、抗过敏、抗风湿，临床使用较广泛。

检测原理

地塞米松检测卡用于快速检测组织样品中的地塞米松残留。本产品应用竞争抑制胶体金免疫层析的原理制成，用于检测样本中地塞米松。样本溶液滴入检测卡的加样孔后，样本溶液中的地塞米松与金标抗体相结合，从而阻止金标抗体与纤维素膜上地塞米松偶联物结合。根据 T 线与 C 线的显色深浅判断结果。

适用范围

本产品适用于水产、畜禽组织中地塞米松残留的定性检测。

注：检测样本种类参照国标 GB2763-2021。

检出限

1 $\mu\text{g/kg}$ (ppb)

试剂盒组成

序号	组成	规格	
		10 次/盒	20 次/盒
(1)	检测卡 (内含滴管、干燥剂)	10 份	20 份
(2)	金标微孔	10 孔/筒	20 孔/筒
(3)	稀释液	1 瓶	2 瓶
(4)	15 mL 离心管	2 支	4 支
(5)	说明书	1 份	1 份

注意事项

- 每次检样前，剪碎样本的刀具需进行清洗，避免交叉污染。
- 检测环境温度应控制在 20~30℃，温度过高或过低，将影响检测结果。
- 请按照检测步骤进行测试，操作时请勿触摸试纸条显色区，避免阳光直射和电风扇直吹。
- 样本处理后请尽快使用，时间过长则需要重新处理样本再检测。
- 待检样品溶液需澄清，否则容易导致显色不明显等异常现象，影响实验结果判定。
- 过期或铝箔袋破损的产品均不可使用，拆封后的检测卡请立即使用。
- 本产品为一次性产品，请勿重复使用或混用来自不同批次的检测卡。
- 出现阳性结果时建议复测，本产品检测结果仅供参考，如需确证，请参照国家相关标准方法。
- 产品评价时，若需直接检测标准品，需用试剂盒内的专用稀释液配制。
- 自来水、蒸馏水、纯净水或去离子水不能作为阴性对照。

安全性说明


- 实验需匹配相应的实验设备和穿戴必需的实验装备 (白服、手套、口罩等) 。
- 检测试剂盒需保存请放在儿童不易接触的地方。
- 实验所用全部物品，应用完毕后应妥善处理。
- 实验后要保持实验室的整洁和实验环境空气的流通性。
- 实验废弃物单独收集，建议按照医疗废弃物处理。
- 请勿食用配备的试剂。

贮藏条件及有效期

- 贮藏条件：2-30℃ 避光保存，勿冷冻。
- 有效期：12 个月。

地塞米松胶体金快速检测卡使用说明书

需自备的工具

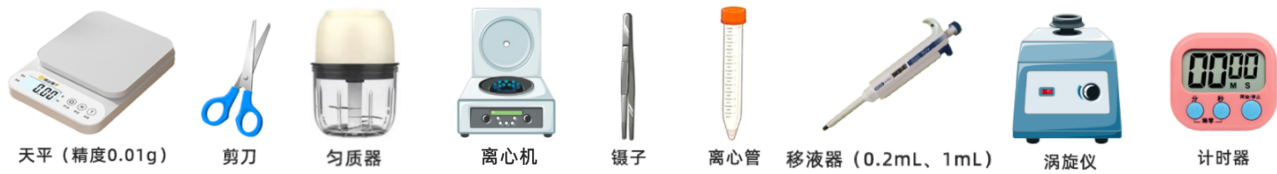


样本前处理步骤

(1) 取切碎的一定量的去脂肪水产或畜禽组织样品，用均质机均质。



(2) 称取约 2 克均质物于离心管中；加入 2mL 稀释液。

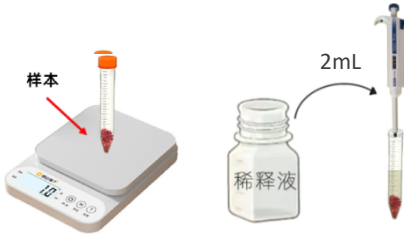


(3) 涡旋振荡 2 分钟，室温下 4000 转/分钟离心 3 分钟，上层清液作为待测液。




样本检测步骤


(1) 从原包装袋中取出检测卡、金标微孔和滴管，放于平整、洁净的台面上。

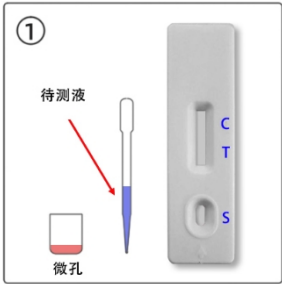


(2) 用移液器或滴管吸取 120 μ L (约 4 滴) 待测液，滴加到金标微孔中，用滴管或移液器反复吸打以溶解微孔中的红色物质，等待反应 2 分钟。

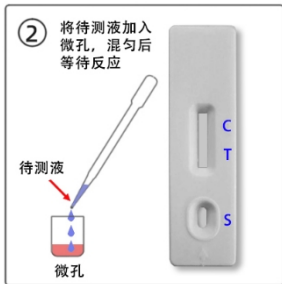

(3) 吸取微孔中全部液体垂直缓慢滴加到检测卡的加样孔 (S) 中；液体流动时开始计时，反应 8~10 分钟，根据示意图判定结果，其他时间判定无效。

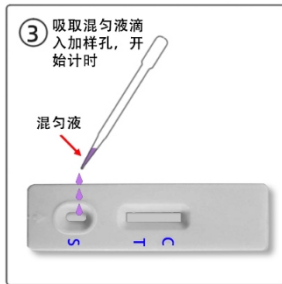

结果判断

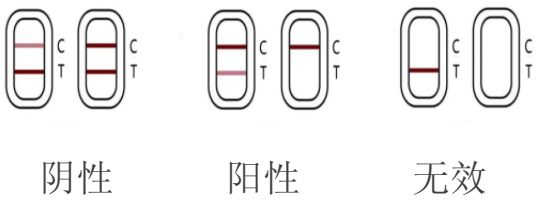

目测：
阴性（未检出）：T 线颜色比 C 线颜色深或者一样深；
阳性（检出）：T 线颜色比 C 线浅或者 T 不显色；
无效：C 线不显色且无论 T 线是否显色。

仪器判读：
详见仪器使用说明书。